

 **Belmont**[®] *Nejvyhledávanější japonské soupravy na světě,
které vynikají spolehlivostí, ergonomií a krásou.*

Krása
Spolehlivost
Ergonomie

Ve stomatologické ordinaci je mnoho technických zařízení a někdy se stává, že místo toho, abyste se věnovali svým pacientům, řešíte problémy s technikou. Nikdo nevolá servis s nadšením. Každý profesionál má rád klid a pocit, že se na nástroje, které každodenně používá, může spolehnout.

I vy můžete prožít pocit „naprosto se spolehnout na své zařízení“. Souprava, která pracuje bez kompromisů mnoho let je přeci základ kvalitní, a navíc i spokojené práce.* Soupravy Belmont pracují bez kompromisů.

Soupravy BELMONT (kompletně vyráběné v Japonsku) mají na celém světě pověst nejspolehlivějších souprav.

* I přes nevídanou spolehlivost souprav BELMONT je samozřejmě zajištěn kvalitní servis do 24 hod v celé ČR i po celém světě.

Optimum[®]
dentální technika



Japonské soupravy
s více než 80-ti
letou tradicí

Zvažujete **výhody** bičového a spodního vedení?

Belmont®

Belmont nabízí *unikátní řešení: zásuvné vedení*

Bičové vedení

+ KLADY

- Při pokládání nemusíte koncovku sledovat
- Koncovka nemůže spadnout na zem
- Hadice „se nemotají“ pod nohama

- ZÁPORY

- Krátká hadice, prakticky při každém výkonu nutné pohnout se stolkem
- Bič omezí Váš pohyb s koncovkou
- Velmi malý prostor pro odkládání nástrojů
- Tah biče, který stále nutí k protipohybu
- Častý střet s ordinačním světlem




Spodní vedení

+ KLADY

- Délka hadice umožní snadnou manipulaci s koncovkou
- Koncovka je volná a nic neomezuje Váš pohyb s ní
- Bez konfliktu se světlem
- Cena

- ZÁPORY

- Při pokládání musíte sledovat, kam koncovku pokládáte
- Nebezpečí pádu koncovky
- Hadice vede přes pacienta
- "Prověšené" hadice vedle pacienta

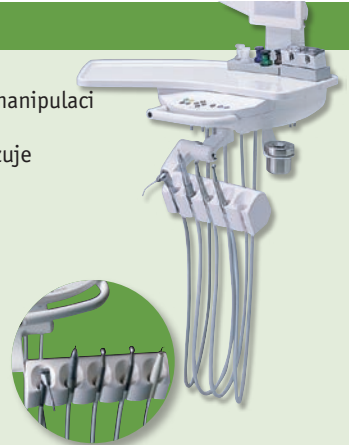

Zásuvné vedení

+ KLADY

- Při pokládání nemusíte koncovku sledovat
- Koncovka při ukládání nespadne na zem, nelze ji „skopnout“
- Délka hadice umožní snadnou manipulaci s koncovkou
- Koncovka je volná a nic neomezuje Váš pohyb s ní
- Velký odkládací prostor
- Hadice vede nad pacientem
- Bez konfliktu se světlem

- ZÁPORY

- "Prověšené" hadice vedle pacienta



Koncovka nespadne na zem.



Délka hadic zásuvného vedení umožňuje volný pohyb koncovky, hadice vede nad pacientem, nikoli přes něho.



Držák nástrojů lze samostatně natáčet i měnit sklon, díky tomu lze přizpůsobit systém Vaším požadavkům.

